

Használati utasítás

Ophylosa 0,15% cink-hialuronát tartalmú oldatos szemcsepp

Milyen készítmény az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp és milyen esetekben alkalmazható?

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp nedvesítő, síkosító szemészeti termék, mely az egészséges szem védelmét és ápolását szolgálja a különböző kellemetlen hatások okozta panaszokkal szemben, melyeket a kontaktlencse viselése, a por, a vakító fény, a szél, a virágpór, a légszennyezés, a légkondicionálás vagy a fűtés, a tartós TV-nézés és számítógép-használat válthat ki. Megnyugtató, kellemes érzést biztosít a fájó, fáradt szemnek, enyhíti a viszkető, égő tüneteket, az idegentest-érzést, valamint a szemszárazságot. Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp egynapos (eldobható) lencsék, merev, gázáteresztő (rigid gas permeable - RGP) kontaktlencsék, kemény kontaktlencsék, valamint hidrofil, nem ionos kontaktlencsék viselése esetén is alkalmazható. Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp nem használható ionos kontaktlencsékkel együtt.

Összetétel:

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp tartósítószer-mentes, sűrűdácscsökkentő és a megfelelő viszkozitást biztosító szemészeti készítmény. Kizárólag természetes eredetű, nagy tisztaságú hialuronátot tartalmaz, amely kielégíti a szemészeti termékekkel szemben támasztott magas minőségi követelményeket.

A cink-hialuronát egy új, szabadalmaztatott, a poliszacharidokhoz hasonló, komplex molekula, mely sajátos biofizikai jellemzői révén tartósítószer hozzáadása nélkül biztosítja az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp mikrobiológiai stabilitását, valamint kiváló szemészeti tulajdonságait.

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp steril, átlátszó, szagtalan, gélszerű vizes oldat, ami 10 ml-es, többszörös adagot tartalmazó flakonban kerül forgalomba.

Egyéb összetevők:

Glicerin (izotonizáló), cink-glükonát, injekcióhoz való víz.

Hogyan hat az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp?

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp fő összetevője, a hialuronát felelős a víz megkötéséért és a testfelszín bőr- vagy nyálkahártya-felületének vízzel való ellátásáért. A hialuronát a szemnek és a könnynek is nélkülözhetetlen alkotóeleme, kiválóan kötődik a szem nyálkahártyához. Tartós védőréteget képez a szem felszínén, így megóvjaa a szemet a kiszáradástól és irritációtól. Egyedülálló, gélszerű tulajdonságának köszönhetően védi és síkosítja a felszíneket, lehetővé téve a nyálkahártyák sűrűdácsmentes elmozdulását egymáson pislogás közben. A pislogások közötti időben pedig hatékonyan csökkenti a könnyezést és ezzel megelőzi a szem kiszáradását.

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcseppben lévő cink-hialuronát a víz visszatartásával és elosztatásával biztosítja a szemfelszín mikrokörnyezetének állandóságát. Becseppentés után a szemcsepp biológiai szempontból kompatibilis filmet képez a szem felszínén, védőréteget alkotva a mechanikus és mikrobiológiai behatásokkal szemben. A hidratált cink-hialuronát réteg sűrű molekuláris hálót formál, ami szűrőként védi a szem felszínét a levegőből vagy közvetlen kontaktus útján érkező mikroorganizmusoktól. Védő funkciója megnyilvánul a szövetkárosító szabad gyökök semlegesítésében és az UV sugárzás káros hatásának csökkentésében is.

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcseppet elsősorban a természetes könny síkosító tulajdonságai alapján alakították ki. A viszkozitás mellett a szemcsepp pH-ja és ozmolalitása is a természetes könnyéhez hasonló annak érdekében, hogy az esetleges irritáció elkerülhető legyen. A cink-hialuronát komplex speciális tulajdonságainak köszönhetően a készítmény mikrobiológiailag stabil.

Felhasználási javaslat:

A készítmény az egészséges szem különféle kellemetlen érzéseinek, mint például a száraz, égő érzésnek a megelőzésére szolgál. Csökkenti az idegentest-érzést és az irritációt (kivörösödést), amelyek kiváltó oka lehet a por, a vakító fény, a szél, a virágpór, a légszennyezés, a légkondicionálás vagy a fűtés, a hosszan tartó TV-nézés és számítógép használat vagy a kontaktlencse viselése. Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp az egynapos (eldobható) lencse, a merev, gázáteresztő (RGP)

kontaktlencse, a keménylencse és a hidrofil, nem ionos lencsék viselése esetén ajánlott a szem és a lencse nedvesítésére.

Alkalmazás:

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp többadagos flakonban kerül forgalomba.

Használat előtt távolítsa el a védőkupakot! A szennyeződés elkerülése érdekében ne érjen semmi a flakon nyílásához!

Fordítsa a flakont fejjel lefelé és cseppentsen 1-2 csepp Ophylosa 0,15% oldatos szemcseppet a szemébe! A becseppentés szükség szerint, naponta többször ismételhető. Használat után helyezze vissza a védőkupakot!

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp a flakon kinyitása után még 6 hónapig használható.

Átmeneti kivörösödés, homályos látás, enyhe égő, szűrő érzés a használat kezdetén alkalmanként előfordulhat, de a legtöbb esetben ez gyorsan, 10-20 másodperc alatt megszűnik.

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp egynapos (eldobható) lencsék, merev, gázáteresztő (RGP) kontaktlencsék, kemény, hidrofil, nem ionos kontaktlencsék viselése esetén a lencsével együtt is alkalmazható.

1-2 csepp becseppentése ajánlott a kontaktlencse behelyezése előtt, és/vagy a lencse kivétele után is. Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp ionos kontaktlencse viselése esetén nem alkalmazható!

Figyelmeztetések:

Ne használja az Ophylosa 0,15% oldatos szemcseppet, ha túlérzékeny annak bármely összetevőjére, vagy ismert allergiája van baromfi eredetű fehérjékkel szemben!

Elvétve kialakulhat helyi érzékenység a készítménnyel szemben. Ha bármilyen váratlan reakciót észlel, hagyja abba a szemcsepp alkalmazását, és ha kontaktlencsét használ, azt haladéktalanul vegye ki! Kövesse pontosan szemésze/optikusa tanácsát és a kontaktlencse-, valamint a lencseápolási termékek használatára vonatkozó minden előírást!

A lencse ápolására vonatkozó előírásokat nagyon pontosan tartsa be (ez különösen fontos a tartós használatú, és/vagy hidrofil kontaktlencsék esetén). Ha bármilyen szokatlan, nem szűnő kellemetlenséget, vörösséget, fájdalmat, fokozott könnyezést tapasztal, haladéktalanul keresse fel szemészt/optikusát! A hosszú ideig viselt lencséknél (pl. a tartós használatú hidrofil kontaktlencséknél) fokozott elővigyázatosság szükséges.

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp nem használható sérült, gyulladt, erősen irritált, beteg szemre!

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp nem használható ionos kontaktlencsékkel. Amennyiben nem tudja biztosan a kontaktlencséjének típusát, kérdezze meg szemészt/optikusát.

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp kizárólag szembe csepegtetve használható! Ne tárolja ezt a szemcseppet a kontaktlencse tartójában!

A becseppentés után közvetlenül a szem kivörösödése, homályos látás, átmeneti, enyhe égő, szűrő érzés esetenként előfordulhat.

Az Ophylosa 0,15% oldatos szemcsepp többszörös adagot tartalmazó flakonban kerül forgalomba, de egy flakont csak egy személy használhat!

Forduljon orvoshoz, szemészhez vagy optikushoz:

- ha nem szűnő irritációt, kivörösödést, gyulladást, érzékenységet (allergiás reakciót) észlel;
- minden egyéb, nem várt tünet jelentkezése esetén.

Tárolás:

5-30°C között tárolandó.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a zárókupak sértetlen! Minden használat után szorosan zárja vissza a kupakot!

A készítményt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

A készítmény a felbontás után 6 hónapig használható fel.

Gyártó:

Richter Gedeon Nyrt.

1103 Budapest
Gyömrői út 19-21.
Magyarország

A tájékoztató készítésének dátuma:







2016. április. verziószám 4.0

Európai szabadalom: EP 0 964 687

TARTÓSÍTÓSZERT NEM TARTALMAZ

CE 0483

Szimbólumok:

	Figyelem! Használat előtt olvassa el a tájékoztatót!
	Gyártási szám
	Steril aszeptikus gyártási technológiával készült
	Lejáratási idő (hónap/év)
	Tárolási hőmérséklet
	Gyártó
	Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást!
	Ne használja, ha a csomagolás sérült!

